


BAWEŁNIANA PÓLMASECZKA OCHRONNA Z GUMKĄ WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Kod: 41197

Wymiary: 17,5 cm x 9,5 cm + 2 gumki (w przypadku zbyt luźnej gumki, można ją skrócić robiąc supetek).

Waga: 7,50 g.

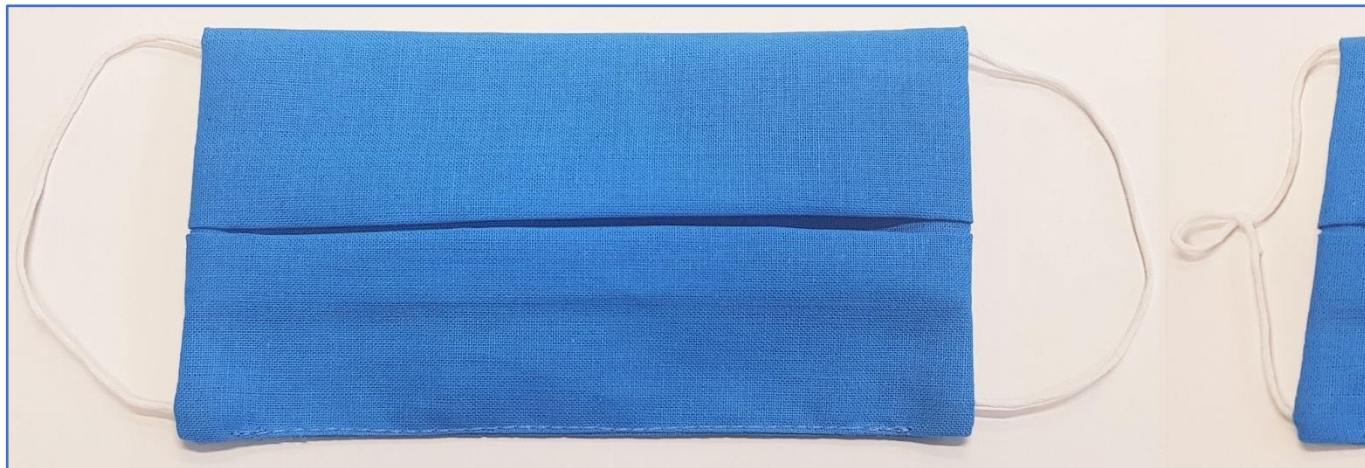

Tkanina: Bawełna 100%, Gramatura: 115-120 g/m².

Certyfikaty: Oeko-Tex Standard 100

Konserwacja:



SPOSÓB UŻYTKOWANIA:

- **Przed pierwszym użyciem półmaskę należy wyprać i wyprasować lub w inny sposób zdezynfekować.**
- Każdorazowo przed założeniem oraz przed i po zdjęciu półmaski należy dokładnie umyć lub zdezynfekować ręce.
- Wysuszyć półmaskę lub należy zmieniać po 2-3 godz. użytkowania.
- Nie należy nosić wilgotnych półmasek, ani udostępniać półmaski innym osobom.
- Półmaska musi dokładnie przylegać do twarzy.
- Nie należy dotykać półmaski już założonej. Jeśli dotkniesz zewnętrznej strony, należy umyć ręce lub zdezynfekować ręce.
- Półmaskę należy zdejmować od tyłu, chwytając ją za mocujące gumki, nie dotykając przedniej części.
- Po użyciu należy zapakować półmaskę do szczelnego foliowego woreczka.
- Przed ponownym użyciem półmaskę należy zdezynfekować.

SPOSÓB DEZYNFEKЦИИ:

- Maseczkę wyprać w pralce w temperaturze max. 70°C, nie prać z innymi materiałami.
- Po wysuszeniu wyprasować maseczkę w temperaturze 150°C - 180°C.

WAŻNE INFORMACJE:

Należy pamiętać, że półmaska nie gwarantuje ochrony przed skażeniem wirusem COVID-19 ani innymi wirusami, a jedynie jest środkiem wspomagającym. Półmaski są skuteczne tylko wtedy, gdy użytkowane są zgodnie z instrukcją oraz stosowane w połączeniu z częstym myciem i dezynfekcją rąk.

Producent:

DAJAR Sp. z o.o.
ul. Poławska 6
75-072 Koszalin